



- ① Lösen Sie eine Tablette in einem Glas mit 150 ml lauwarmem Wasser (30-35°C) auf.



- ② Geben Sie Ihre Prothese hinein und lassen Sie die Lösung 3 Minuten einwirken. Für eine intensivere Reinigung kann die Prothese auch 30 Minuten oder länger in der Lösung belassen werden.



- ③ Entnehmen Sie die Prothese und spülen Sie sie unter fließendem Wasser ab.

Ihre Zahnprothese ist nun sauber, frisch, geruchsfrei und einsatzbereit. Die tägliche Anwendung wird empfohlen.

**Warnhinweise:**

Nur zur äußerlichen Anwendung. Entsorgen Sie nach dem Gebrauch die Lösung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf eine Zutat oder Persulfat allergisch reagieren. Nehmen Sie keine Tabletten in den Mund. Das Pulver für die Tabletten kann Augenreizungen auslösen. Die Lösung darf nicht getrunken werden oder als Mundwasser verwendet werden. Die Prothese vor dem Einsetzen gut abspülen. Sollten Sie nach erstmaliger und wiederholter Anwendung eine Irritation der Schleimhäute, Schwellung, Schmerzen oder Brennen bemerken, stellen Sie die Verwendung des Produktes sofort ein und suchen Sie ärztlichen Rat. Gebrauchsanweisung beachten. Trocken aufbewahren. Nur zum einmaligen Gebrauch. Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

**Inhaltsstoffe:**

Sodium Bicarbonate, Potassium Monopersulfate, Citric Acid, Lactose, Sodium Carbonate, PVP/VA Copolymer, Sodium Lauryl Sulfate, Peppermint Flavour, CI 73015