

RLV-WESTE DAS ORIGINAL

Rücken-Lage-Verhinderungs-Weste



Inhaber: GMV mbH

Nassaustraße 10, 65719 Hofheim/Ts

Gebrauchsanweisung der RLV-Weste

Mit der RLV-Weste soll eine Rückenlage des Patienten bei einer **Rückenlage bezogenen obstruktiven Schlafapnoe** verhindert werden.

Benutzung der RLV-Weste und -Polster

Das RLV-Polster in die Tasche auf der Außenseite der RLV-Weste einfügen. Bei einem zusätzlichen Einsatz der Komfort-Rückeneinlage, die Einlage in die Innentasche der RLV-Weste einschieben (Sonderausstattung). Die RLV-Weste wird beim Schlafen über der gewohnten Kleidung getragen. Dabei sollten die Klettverschlüsse soweit übereinander liegen, dass die RLV-Weste eng am Körper anliegt, aber nicht einschnürt. Bitte kontrollieren Sie noch mal den genauen Sitz der RLV-Weste.

Reinigung der RLV-Weste u. -Polster

Polster-Bezug: 60° Maschinenwäsche, bei 90° 2% Verlust - Trockner geeignet.

RLV-Weste: 60° Maschinenwäsche, bei 90° 2% Verlust - Trockner geeignet.

Polster: Gelegentlich feucht abwischen.

Visco-med-soft Rückeneinlage:
Eignet sich nur für die Handwäsche.

Hinweise

Die Polster nicht über die vorgegebene Flexibilität hinaus verformen. Unter Einfluss von Sonnenlicht können sich die Farben der Schaumstoffe verfärben. Das hat aber keine Auswirkung auf die Funktion der Materialien.

Nebenwirkungen

Selten können Verspannungen auftreten.

 **Stand:** Januar 2012

Ihr Therapiepartner

GMV Gesellschaft für medizintechnische Versorgung mbH

Zentrale Hofheim

Nassaustraße 10

Tel. 06122 - 75 28 - 0

info@gmv-hofheim.de

65719 Hofheim/Ts.

Fax. 06122 - 75 28 - 51

www.gmv-hofheim.de

